

SENIOR[®]



Der erste ergonomische Pilleneingeger für Kühe.

wissenschaftlich
geprüft

Was ist SENIOR?

Der erste ergonomische Pilleneingeger für Kühe. Handlicher und sanfter.

Wofür ist der SENIOR?

Milchkühe.

Was ist ergonomisch?

Der SENIOR ist gebogen, wie der Weg durch die Maulhöhle zum Schlund. Das Ende ist abgerundet.

Was ist handlicher?

Der SENIOR liegt besser in der Hand.

Woraus besteht der SENIOR?

Rohr aus Edelstahl, Stößel aus Kunststoff.

Wie anwenden?

Pille einsetzen. Mit einer Hand über den Nasenrücken in den zahnfreien Kiefernrand fassen.

Gaumen kitzeln, bis die Kuh das Maul von selber öffnet.

Mit der anderen Hand SENIOR vorsichtig in die Maulhöhle schieben. Vorsichtig über den Zungengrund hinweg schieben, bis der rote Schraubenkopf auf Höhe des Flotzmaules liegt. Pille freigeben.

Wie reinigen?

Mit fließendem heißen Wasser abspülen.



Gaumen kitzeln bis das Maul öffnet.



Eingeger vorsichtig einschieben.



SENIOR. Ergonomisch.

SENIOR. Wissenschaftlich geprüft.

SENIOR[®]. Handlicher und sanfter.