

FLUX



La sonde ruminale longue.

testé
scientifiquement

Qu'est-ce que FLUX?

La sonde ruminale longue.

À quoi sert FLUX?

À l'introduction sûre de liquides dans la panse.

Pourquoi FLUX est-elle sûre?

Lorsque la marque se situe à la hauteur des incisives, le bout de la sonde se situe dans la panse. Pas de risque d'introduction dans les poumons.

Comment l'utiliser?


Tirer la tête de la vache vers l'avant, de sorte que la tête, le cou et la colonne vertébrale forment une ligne droite. Introduire FLUX dans la gueule par la zone de la mâchoire dépourvue de dents. Avancer FLUX prudemment jusqu'à ce que la marque se situe à la hauteur des incisives. Raccorder l'entonnoir. Introduire le liquide. Retirer FLUX prudemment.

Comment nettoyer?

Raccorder FLUX à un robinet et rincer. Tenir élevée la tête de FLUX, afin que l'eau qui sort puisse s'écouler le long de la sonde.

De quoi est constituée FLUX?

FLUX est en acier inox, avec marque, entonnoir et raccord rapide GARDENA®.

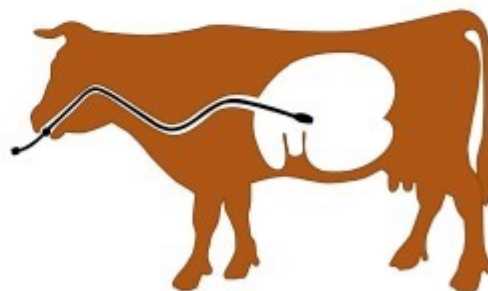

FLUX. Testé scientifiquement.

Geishauser et al. 2010: Tierärztl. Umsch. 65, 429-434.

FLUX. Introduction sûre de liquides dans la panse.